

СПУМАНЕТ



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «АВАНСЕПТ МЕДИКАЛ»

Литвинец В.Г.

АННОТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Пеногаситель «СПУМАНЕТ»

Назначение: пеногаситель «СПУМАНЕТ» предназначен для подавления пенообразования при дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок дезинфицирующими средствами «Мистраль», «Авансепт Актив», «МИСТРАЛЬ ОКСИ», «ЛАКТО», «СЕВЕРЯНИН», «СЛАВЯНКА», «ПОЛИКЛИН», «ТОТУС».

Применение: для подавления пенообразования при дезинфекции отсасывающих стоматологических установок, слюноотсосов перед использованием добавляют 3 капли средства «СПУМАНЕТ» к 1 л рабочего раствора одного из вышеуказанных дезинфицирующих средств, приготовленных в соответствии с Инструкцией по применению.

Состав: сополимер полиалкиленоксида и кремнийорганического полимера.

Форма выпуска: полимерные флаконы объемом от 10 до 100 мл.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в плотно закрытой упаковке изготовителя.

Условия хранения: средство хранят в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0°C до +35°C, вдали от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете; хранить отдельно от лекарств в местах, недоступных детям.

Однократное замораживание продукта не снижает эффективности пеногашения. Использование горячей воды для быстрого размораживания продукта запрещено, замороженный продукт необходимо выдержать до его полной разморозки в теплом помещении, исключая подогрев.

Изготовлено: ЗАО НПО «Химсинтез»,
141290, Россия, Московская область,
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33.
Контакты: 125212, Россия, г. Москва,
ул. Выборгская, д. 16, стр. 1,
Телефон: +7 (495) 514-19-00, 514-19-07,
Факс: +7 (495) 514-19-01, E-mail: info@vitapool.ru