

Описание

Monobond Etch & Prime служит для подготовки силикатной керамической поверхности к созданию адгезивной связи с фиксирующим композитом, например, продуктами линий Variolink и Multilink.

Monobond Etch & Prime протравливает и силанизирует силикатную керамическую поверхность за один рабочий этап.

Состав

Спиртово- водный раствор полифторида аммония, метакрилата силана и красителя.

Показания

- Подготовка силикатной керамической поверхности к созданию адгезивной связи с фиксирующими композитами.

Противопоказания

- применение вне области показаний
- при имеющейся аллергии на компоненты Monobond Etch & Prime.
- внутриротовое применение

Побочные действия

Систематические побочные действия неизвестны. В редких случаях компоненты Monobond Etch & Prime могут привести к возникновению чувствительности. В таких случаях от применения следует отказаться.

Взаимодействие с другими веществами

В течение всего рабочего процесса непременно следует избегать контакта поверхности, обработанной Monobond Etch & Prime, со слюной и кровью.

Применение

Подготовка обработанных и необработанных реставраций из силикатной керамики

(например, IPS Empress®, IPS e.max® Press, IPS e.max CAD)

- После примерки реставрацию тщательно промыть под струей воды и высушить воздухом без примесей воды и масла
- Нанести Monobond Etch & Prime на адгезивную поверхность микробрашом и втирать в поверхность в течение 20 секунд, слегка надавливая. Оставить действовать еще на 40 секунд.
- Тщательно смыть водой Monobond Etch & Prime, пока не исчезнет зеленый цвет. Если остаток в микропорах сохраняется после промывки, реставрацию можно очистить водой в ультразвуковой ванне в течение 5 минут.
- Высушивайте реставрацию сильной струей воздуха, не содержащей воды и масла, в течение примерно 10 секунд.

Зафиксировать реставрацию на подготовленной поверхности с помощью фиксирующего композита (например, Variolink® Esthetic или Multilink® Automix) в соответствии с инструкцией производителя.

Особые указания

- во избежание загрязнения Monobond Etch & Prime нельзя брать напрямую из бутылочки микробрашем.
- бутылочку с Monobond Etch & Prime после использования тщательно закрывать

Меры предосторожности

- Продукт содержит спирт. Держать вдали от источников открытого пламени.
- Monobond Etch & Prime оказывает травящее действие. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой. При контакте с кожей сразу же промыть большим количеством воды.
- В редких случаях контакт с кожей может приводить к появлению чувствительности на компоненты препарата.
- Обычные перчатки не дают эффективной защиты от сенсibiliзирующего эффекта на метакрилаты.

Условия хранения

- Monobond Etch & Prime не использовать после истечения срока годности
- Температура хранения 2–28 °C
- Длительность хранения: см. срок годности на этикетке.

Хранить в месте, недоступном для детей!

Для использования только в стоматологии!

Материал был разработан для применения в стоматологии и подлежит использованию только в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того, потребитель обязан под свою ответственность проверить продукт перед его использованием на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели не указаны в инструкции по использованию.